


Att använda hörselprodukterna

Sändare:



Av och på: Enheterna startas genom att hålla inne on/off knappen på enhetens ovasida minst 2 sekunder tills den gröna stapeln i displayfönstret är fylld.

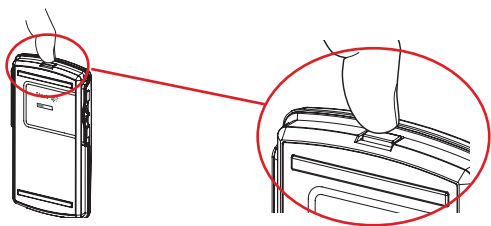

Conference Microphone
DC20




Microphone
DM10

Mottagare:



Receiver
DH10

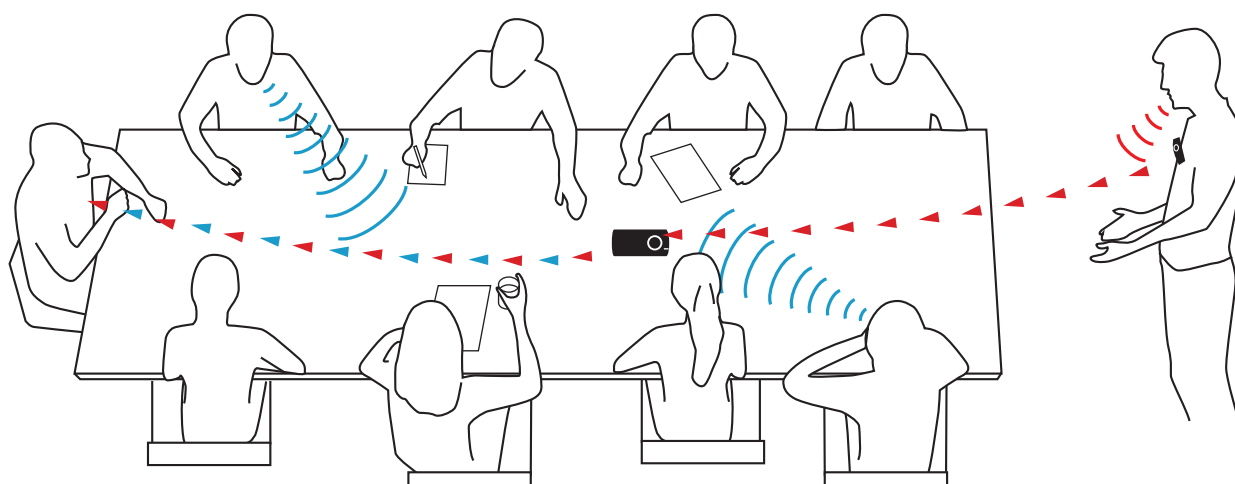

Så här används mikrofonerna

Starta och placera bordsmikrofonen (Conference Microphone DC20) så centralt som möjligt, mitt i gruppen för att ta upp frågor, svar och inlägg från alla mötesdeltagare.

Om bordet är U- eller O-format, placera gärna bordsmikrofonen på ett litet bord i mitten för att få bästa möjliga ljud.

Starta och fäst den lilla mikrofonen (Microphone DM10) på den som håller i mötet eller ska presentera något. Den lilla mikrofonen sänder via bordsmikrofonen som mixar ihop ljudet och sänder ut det till mottagarna. Bordsmikrofonen måste alltså vara påslagen för att den lilla mikrofonen ska fungera.

Sekretess: Överföringen är digitalt kodad och för att kunna lyssna måste du mottagaren vara inställd på samma kanal och med den specifika kodnyckel som produkterna i denna väska har tilldelats.


För instruktion om laddning - vänd blad

För att lyssna krävs en mottagare (Receiver DH10).
För information om hur denna används se separat instruktionsblad i A5-format.

Tillgänglighetsväska nr 1 - användarinstruktion

Att ladda hörselprodukterna

Enheterna laddas och förvaras i väskan vilket också gör det enkelt att flytta hela utrustningen. Behåll locket öppet under laddning!

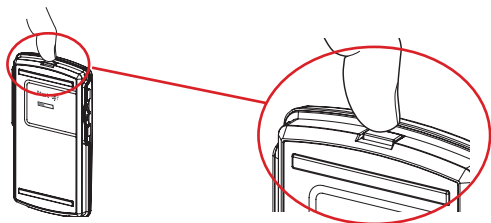

Enheterna laddas upp från helt tomma till fullt uppladdade på 3-8 timmar (går snabbare om de inte är urladdade) och enheterna har en drifttid på upp till 8 timmar. Man kan ha som rutin att ladda en hel dag eller natt så vet man att de är fullt uppladdade.

Viktigt! Se till att enheterna är avstängda innan de sätts på laddning: Tryck till på on/off-knappen en liten stund och titta på "starta och stänga av-stapeln" i menyfönstret. Står det "Starta?" är den redan avstängd och då släpper man knappen innan den startat.

Står det "Stänga av?" - håll knappen intryckt tills stapeln är fylld och det släcks.

Så här laddar du

I väskans lock finns 2 laddare märkta med "Type: A14" för anslutning till 2 vägguttag och till kontakterna på bägge sidor inne i väskan (se de röda cirkelarna på bilden).

När enheterna sitter rätt i laddstället och laddaren sitter i väggkontakten så lyser det en röd lysdiod på toppen av alla enheter - då laddas de. Lyser det inte så placera om enheten så att de sitter rätt i laddstället.

När enheterna lyser grönt är de färdigladdade.

